

Excite® F

エキサイト F



フッ素除放性 光重合型 1液性ボンディング材


ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

ExcITE® F

Convenient & Efficient



エキサイト F はトータルエッチテクニックタイプの光重合型ボンディング材です。

Light cure 光重合型

リン酸エッチングを用いた直接修復法によるコンポジット修復、また皮膜が薄いため(10 ~ 20 μm)、間接修復法により製作されたコンポジットやセラミックスの接着時にも使用できます。

Strong bond to Enamel & Dentin エナメル質、象牙質ともに高い接着強度

良質なナノフィラーからなるエキサイト F は、1 層の塗布で歯牙との安定した接着ができます。

Acetone-free アセトンフリー

エキサイト F は溶媒としてエタノールを使用しており、室温での長期保管でも安定した品質を保ちます。


Fluoride release フッ素除放性

フッ素を含有しており、治療後数日間フッ素を除放します。

Glossy Layer 見やすい塗布面

光沢のある液体で、塗布箇所を確認しながら使用できる、操作性の良いボンディング材です。

24時間後のせん断接着強度

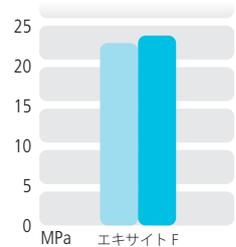

● エナメル ● デンチン

出展：IVAG R&D 2009年12月

TIME-SAVING 短い処理時間

リン酸エッチングをします。
(例：トータルエッチ)
エキサイト F を1層塗布します。
(最短10秒スクラブします)
エアードライします。
10秒間光照射します。

デリバリーフォーム

使いやすいシングルドースタイプと、経済的なボトルタイプがあります。



エキサイト F シングルドース

630377AN 0.1g × 50



エキサイト F ボトル

630375AN 5g × 1



ビバデント アプリケーター R

ライトブルー

631699 50 本

一般的名称：歯科用象牙質接着材 / 販売名：エキサイト F / 認証番号：222AGBZX00087000 / 管理医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 1-28-24

TEL : 03-6903-3537 FAX : 03-5844-3657

www.ivoclarvivadent.jp

info.japan@ivoclarvivadent.com

JP630375B0

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation