

感染予防対策に 「使い捨て」の チョイスを

OptraDam® | OptraGate®

オプトラダム オプトラゲート

患者様の口にフィットする
3D構造のラバーダム

患者様の開口をやさしく
助ける開口器



Efficient
Esthetics

ivoclar

オプトラダム

3D 構造のラバーダムでフルアイソレーション(隔離)

オプトラダムは、解剖学的にデザインされた柔軟性のある3D構造のラバーダムです。使い捨てなので、感染予防対策の手段の1つになります。

使い捨て

滅菌等の感染管理の気配りから解放が可能

拡散を減らす

歯科医院内で起こりうるエアロゾルを減少^{*1}

メタルフレームいらず

装着中も着脱時も患者様は快適

*1 L. P. Samaranayake, J. Reid, N. Evans; ASDC Dent. Child. 56, 442-444 (1989):
The efficacy of rubber dam isolation in reducing atmospheric bacterial contamination(only abstract available)

オプトラゲート 口腔内の防湿を容易にする

オプトラゲートは、ラテックスフリーの開口器です。柔軟性と弾力性により、患者様の開口を助けながら装着が可能です。

使い捨て

滅菌等の感染管理の気配りからの解放が可能

パーシャルアイソレーション(簡易隔離)

でより効果的な術野の確保

治療箇所にアクセスが容易

集中と効率

スタッフの手を借りず、治療に集中できる

グローバルで
100
million 1億個以上使用^{*2}

*2 Ivoclar Vivadent AGが出荷した実績

術野の確保 なしに 審美は語れない

審美修復治療を成功させるためには、唾液および血液等による汚染を防ぐ必要があります。

オプトラダムは、フルアイソレーション（隔離）が必要なケースだけではなく、より高い防湿が求められる一般歯科治療にも使用可能です。

ラバーダムを取り入れることによって、エアロゾル汚染や患者様、医療従事者の保護手段を向上させます。



治療を成功させるために、患者様にとって快適性の高い、パーシャルアイソレーション（簡易隔離）はよく使用される方法です。

直接修復時だけではなく、セメンテーションの時に防湿が不可欠な症例に、簡易隔離ができる**オプトラゲート**は、審美治療のサポートが可能です。



オプトラダムの装着は
こんなにも簡単！



装着ビデオは
こちらにアクセス

<https://vimeo.com/576989452>

ラバーダムで エアロゾルを削減

口腔内からの微生物拡散に対する第1段階のバリアとなる、ラバーダム。

治療中の微生物拡散防止をするため、ラバーダムの使用は標準的な対策です。

臨床試験では、ラバーダムの使用により微生物が90～98%^{*3} 減少するという結果を示しています。



^{*3} M. A. Cochran et al; JADA 119, 141-144 (1989): The efficacy of the rubber dam as a barrier to the spread of microorganisms during dental treatment.

オプトラダム 素早く簡単にセットするための3つの改善


- ① 一体型フレーム：フレームの曲げやすさが改善され、患者様の口腔内に簡単セット
- ② 歯列ガイドの位置：歯肉溝に自然とはまり、歯肉周辺の隔離性が向上
- ③ ラテックス材の弾力性：歯間に通しやすい



フレームの曲げやすさ



クランプなしで前歯の装着

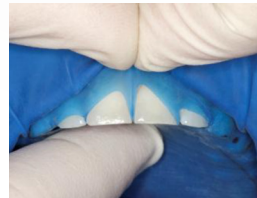

歯間に通しやすい弾力性

オプトラゲートで 集中と効率的なワークフロー

術野確保のためには、治療を終えるまで、デンタルミラー等で患者様の口を広げて維持する必要があります。

オプトラゲートは、頬粘膜と口唇を均等にかつやさしく広げるため、頬粘膜と口唇を排除することを意識しないで治療に集中できます。

ラテックスフリーのオプトラゲートは、やわらかい素材で作られているため、患者様により高い快適性を与えます。また、患者様の口を長時間にわたって無理なく開口してくれるため、治療効率の向上が可能です。

明るいピンクとブルーのカラーバリエーションは、子供たちを喜ばせ、治療に対して前向きになるようデザインされました。

様々な症例で活用

オプトラゲートは、様々な治療に対応可能です。デンタルミラー等による頬粘膜と口唇排除から起きる疲れは、オプトラゲートで緩和することが可能です。



ホワイトニング




口腔内スキャン



セメンテーション



レジン充填

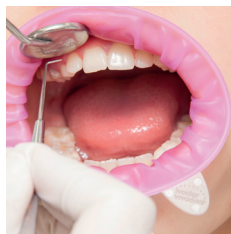

小児歯科のPMTC



小児歯科の
修復治療



矯正治療

Delivery forms

製品内容

オプトラゲート	オプトラゲート カラー	オプトラダム
アソートメント 577275WW <ul style="list-style-type: none">・レギュラー 40 枚・スモール 40 枚	アソートメント スモール 669088WW <ul style="list-style-type: none">・ブルー 20 枚・ピンク 20 枚	レギュラー 627399AN <ul style="list-style-type: none">・レギュラー 50 枚
レギュラー 590850WW <ul style="list-style-type: none">・レギュラー 80 枚	アソートメント ジュニア 669089WW <ul style="list-style-type: none">・ブルー 20 枚・ピンク 20 枚	スモール 627400AN <ul style="list-style-type: none">・スモール 50 枚
スモール 590851WW <ul style="list-style-type: none">・スモール 80 枚		
ジュニア 591451WW <ul style="list-style-type: none">・ジュニア 80 枚		
レギュラー ハーフ 683377WW <ul style="list-style-type: none">・レギュラー 40 枚		
スモール ハーフ 683378WW <ul style="list-style-type: none">・スモール 40 枚		
ジュニア ハーフ 683376WW <ul style="list-style-type: none">・ジュニア 40 枚		

※スモールが標準程度のサイズとなっております。



一般の名称：歯科用ラバーダム / 販売名：オプトラダム / 届出番号：13B1X10049IV0011 / 一般医療機器
一般の名称：歯科用開口器 / 販売名：オプトラゲート / 届出番号：13B1X10049IV0001 / 一般医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷1丁目28番24号
TEL：03-6801-1301 FAX：03-5844-3657

ivoclar.com

ivoclar