

健保適用

プロフェッショナル デンチャーベース材

ProBase®

プロベース
コールド / ホット




均質なレジン床製作 幅広い柔軟性

プロベースは重合後の寸法安定性に優れ、変色も少ない床用レジンです。適合性がよく耐久性のあるデンチャーが製作できます。加熱重合、常温重合タイプで様々な製作技法に対応します。



NEW

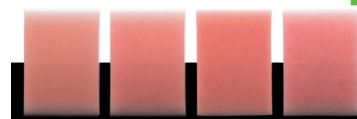

ピンク ピンク-V ピンク-V インプラント Preference

新シェードのPreferenceは、ヨーロッパで多く採用されており、ピンク-Vよりもやや赤系の歯肉色を表現したシェードになります。

プロベース コールド 常温重合型床用レジン

義歯製作マテリアルとして、SR サクラールと共に健康保険適用の床用レジン製品としてご使用頂けます。SR-イボカップと同じシェードラインナップで、補修に適しています。流動性が良く、練和後すぐに適度な粘度になり、流し込むことができます。形態付与も容易なレジンです。

適応

- ✓ 補修
- ✓ リベース / リライニング
- ✓ 総義歯（フラスコ技法）
- ✓ 部分床義歯
- ✓ デジタルデンチャー床用レジン補修

製作

- ✓ 流し込み技法
加圧器で2～6気圧 / 40℃ 15分
- ✓ フラスコ技法（パッキング技法）
クランプ加圧で30分（室温23℃）

Preferenceの特長

- ・保険義歯の製作材料として
- ・適合性が高く耐久性のあるデンチャー製作に
- ・デジタルデンチャーの補修材料として

プロベース ホット 加熱重合型床用レジン

ポリマーとモノマーを練和後、8～10分で填入が可能で、その後最短45分で重合ができます。粒子が細かく、適度な粘度でレジンを手やインスツルメントにこびり付きがしづらく、填入もスムーズで作業効率が上がります。



適応

- ✓ 総義歯
- ✓ 部分床義歯
- ✓ コンビネーションデンチャー

製作

- ✓ フラスコ技法による6種の重合法に対応

製品情報

スタンダードキット

ポリマー 500g × 2, モノマー 500mL × 1,
メスシリンダー × 2, ミキシングカップ

コールド 531493AN ピンク-V

コールド 563541AN Preference

ホット 531463AN ピンク-V



ポリマー 500g × 2

コールド 531515 ピンク-V 629294AN ピンク-V インプラント 531514 ピンク

531517 クリア 563542 Preference

ホット 531476 ピンク-V 629093AN ピンク-V インプラント

モノマー 500mL × 1 コールド 531505 ホット 531471

プロベース ホット/コールド シェードガイド セット

552058 1セット

一般の名称：義歯床用アクリル系レジン / 販売名：プロベース / 認証番号：221AGBZX00010000 / 管理医療機器
一般の名称：硬質レジン歯 / 販売名：SR サクラール / 認証番号：302AGBZX00002000 / 管理医療機器

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24

TEL：03-6801-1301 FAX：03-5844-3657

ivoclar.com



関連製品
SR サクラール
パンフレット