

Stratos®-3Shape-Scanner-Transfer-Set

Das Daten-Transfer-Set für 3Shape-Laborscanner



Schnell und
effizient in die
digitale Welt

Stratos®-3Shape-Scanner-Transfer-Set

Das Daten-Transfer-Set für 3Shape-Laborscanner

Mit diesem Stratos®-Scanner-Transfer-Set kann der Datentransfer vom Stratos-Artikulator in den 3Shape-Scanner einfach, schnell und effizient erfolgen. In Zusammenarbeit mit Baumann Dental wurde das zum Patent angemeldete Produkt entwickelt. Der Vertrieb erfolgt über Baumann Dental. Folgende Sets stehen für den Stratos-Artikulator zur Auswahl:



Stratos®-3Shape-Scanner-Transfer-Set (Baumann Dental-Art.-Nr.10034)



Adesso Split-Magnetplattensystem für Stratos (Baumann Dental-Art.-Nr. 10008)

Ideale Voraussetzungen für den Einsatz des Scanner-Transfer-Sets bietet eine bereits vorhandene konventionelle Gleichschaltung mit Adesso Split. Dies ermöglicht den Austausch der Modelle zwischen allen ihren gleichgeschalteten Artikulatoren.

So einfach geht es:



Artikulator-Kalibrierobjekt (Art.-Nr. 680343) am OK-Halter montieren und fixieren



Transfereinheit im Stratos-Oberteil mittels Adesso Split Magnetplattensystem befestigen



UK-Halter im Stratos-Unterteil mit Adesso Split-Magnetplattensystem befestigen, Justierkleber im Kalibrierobjekt einbringen



Stratos-Artikulator komplett schliessen und Justierkleber trocknen lassen



Stratos-Artikulator umdrehen, und fertig sind die Unterlagen für den 3Shape-Scanner-Transfer

Zubehörteile

Die Firma Baumann Dental GmbH stellt für die Artikulator-Gleichschaltung auch für den Stratos-Artikulator verschiedene Zubehörteile zur Verfügung. Diese können gemäss den Kundenwünschen individuell zusammengestellt werden.

Alle notwendigen Informationen (Art.-Nr., Preise, Liefertermine) sowie Bestellmöglichkeiten finden Sie auf www.baumann-dental.de.

Sie können direkt bestellen:

Baumann Dental GmbH

Frankenstrasse 25

D-75210 Keltern

Tel. +49 (0)7236 933 690

Fax +49 (0)7236 933 6999

E-mail: info@baumann-dental.de

www.baumann-dental.de

Hersteller und Vertrieb
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Vertrieb Deutschland
Ivoclar Vivadent GmbH
Dr.-Adolf-Schneider-Str. 2
73479 Ellwangen, Jagst
Tel. +49 7961 8890
Fax +49 7961 6326
info@ivoclarvivadent.de
www.ivoclarvivadent.de

DE/2019-06


ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation